

# BIHLER Protect P1

Das Visier Bihler Protect P1 montieren Sie einfach und schnell in vier Schritten. Zuerst kleben Sie einen Schaumstoffstreifen an die Innenseite des Kopfbandes. Dann stecken Sie das Visier auf die beiden Zapfen rechts und links auf und drehen die zwei Muttern fest.

Anschließend können Sie das Edelstahlband durch Biegen exakt an Ihre Kopfform anpassen. Für eine kleinere Größe biegen Sie das Band übereinander, testen die Form und wiederholen diesen Vorgang, bis es für Ihre Kopfform passt.

Das Paket besteht aus: 1 Kopfband aus Edelstahl, 1 Visier, 2 Muttern und 6 Schaumstoffstreifen (5 Streifen als Ersatz). Das Visier ist zu 100% recycelbar.


Reinigung: Reinigen Sie das Visier bitte mit verdünntem Spülmittel – nicht mit Desinfektionsmittel. Das Kopfband aus Edelstahl (ohne Schaumstoffstreifen) kann mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.

*The visor Bihler Protect P1 can be assembled quickly and easily in four steps. First glue a foam strip to the inside of the headband. Then put the visor on the two pins on the right and left and tighten the two nuts.*

*Afterwards you can bend the stainless steel band to exactly fit your head shape. For a smaller size, bend the temples over each other, test the shape and repeat this process until it fits your head shape.*

*The package consists of: 1 headband made of stainless steel, 1 visor, 2 nuts and 6 foam strips (5 strips as replacements).. The visor is 100% recyclable.*

*Cleaning: Please clean the visor with diluted detergent – not with disinfectant. The headband made of stainless steel (without foam strips) can be cleaned with disinfectant.*

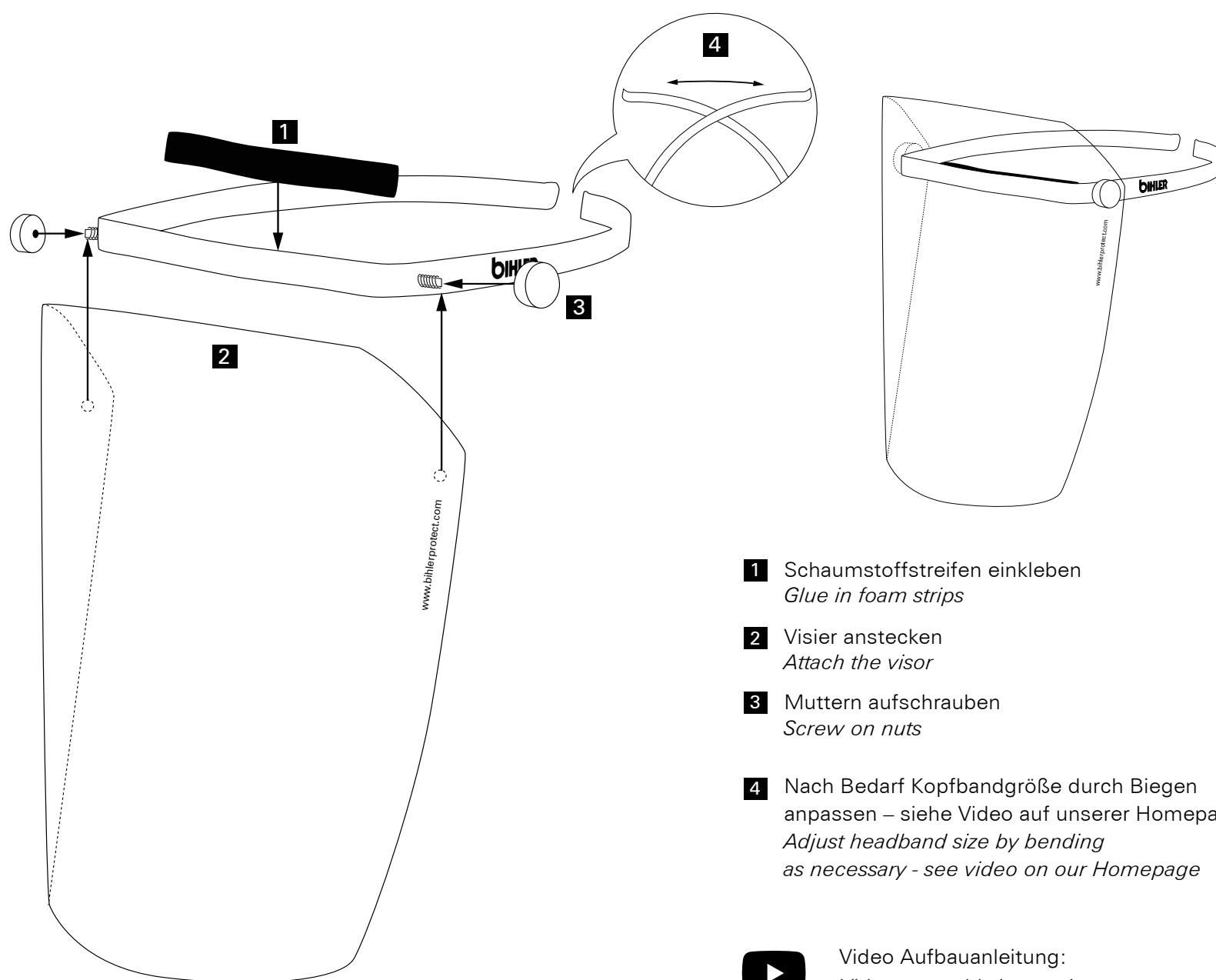

- 1** Schaumstoffstreifen einkleben  
*Glue in foam strips*
- 2** Visier anstecken  
*Attach the visor*
- 3** Muttern aufschrauben  
*Screw on nuts*
- 4** Nach Bedarf Kopfbandgröße durch Biegen anpassen – siehe Video auf unserer Homepage  
*Adjust headband size by bending as necessary - see video on our Homepage*



Video Aufbauanleitung:  
*Video assembly instructions:*  
[www.bihlerprotect.com](http://www.bihlerprotect.com)



Made by Bihler in Germany.



Nicht verkehrstauglich.  
Dieses Produkt eignet sich nicht für den direkten Blick in die Sonne und schützt nicht gegen künstliche Lichtquellen wie z.B. Solarien.  
Das Visier ist nicht für den Gebrauch als Augenschutz gegen mechanisch beeinflusste Gefahren geeignet.

*Not suitable for driving use.  
This product is not suitable for looking directly at the sun and does not protect against artificial sources of light, such as in solariums  
The visor is not suitable for protecting eyes from mechanical hazards.*